

הנחיות ללקיחת דם נכונה במבחנות קרישה

(Sodium Citrate)




לקיחת דם למבחנות קרישה עם פרפרית:

- במידה ועובדים עם פרפרית למילוי מבחנת קרישה יש לרוקן את האוויר הכלוא בפרפרית אל מבחנת "סרק" אשר תיזרק לאחר ריקון האוויר מצינור הפרפרית. רק לאחר מכן יש למלא את מבחנת הקרישה
- יש להקפיד על מילוי מדויק של מבחנות הקרישה עד למשולש המופיע ע"ג המדבקה
- מיד לאחר מילוי המבחנה יש להפוך בעדינות את המבחנה 6-8 פעמים

סיבות אפשריות לחוסר מילוי של מבחנות קרישה:

- אוויר הנמצא בצינור הפרפרית : יש לדאוג למילוי הצינור בדם ע"י מבחנת סרק
- כניסה לא טובה של המחט לוריד: יש להוציא את המבחנה מהHOLDEX ולמצוא וריד אחר.
- תמט של הוריד בזמן הלקיחה : יש להוציא את המבחנה מהHOLDEX ולמצוא וריד אחר.
- החיבור בין צינור הפרפרית ל- Holdex לא מספיק חזק, אוויר נכנס למבחנה: יש לחזק את החיבור

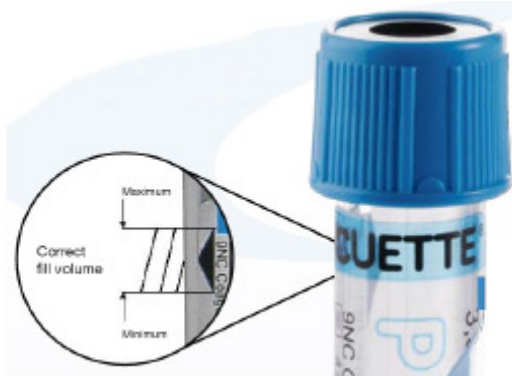

DE-GROOT MEDICAL LTD. 1993
דה-גרוט מדיקל בע"מ 1993