

Blood Culture Holder



הוראות שימוש ללקיחת דם לתרבית



1-יש לחבר את ה Luer Adaptor והפרפרית ל HOLDER



2-לסמן את כמות הדם הדרושה על סקאלת הבקבוק בהתאם לדרישת המעבדה




3-לחטא את אזור הדקירה



4-לדקור



5-יש לדחוף את ה HOLDER אל הבקבוק!! יש להחזיק את הבקבוק מתחת לנקודת הדקירה במידה וצריך לקחת דגימות דם למבחנות ממשיכים באותו HOLDER

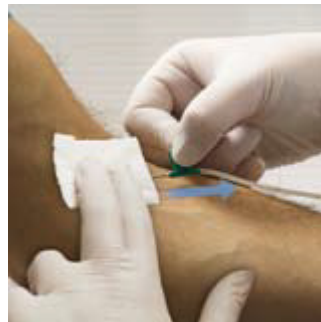

6-בגמר התהליך מוציאים את הפרפרית בעדינות מהווריד ולוחצים בעזרת פד



7-יש לזרוק את האביזרים לפח המתאים